


PROTEINAS TOTALES EN OTROS FLUIDOS

Código fonasa/particular	308050										
Nombres del examen	Proteínas totales en líquidos biológicos										
Tiempo de respuesta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Laboratorio</th> <th>Días de procesamiento</th> <th>Plazo de entrega</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clínica Puerto Varas</td> <td>Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs</td> <td>1 día hábil</td> </tr> </tbody> </table>			Laboratorio	Días de procesamiento	Plazo de entrega	Clínica Puerto Varas	Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs	1 día hábil		
Laboratorio	Días de procesamiento	Plazo de entrega									
Clínica Puerto Varas	Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs	1 día hábil									
Preparación del paciente	Según tipo de muestra e indicación médica.										
Muestra requerida	Líquido biológico en frasco estéril tapa blanca  Recolectar mínimo 2 ml de fluido biológico Se debe centrifugar antes de 2 horas separando el sobrenadante										
Estabilidad de la muestra	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Muestra</th> <th>T° ambiente (20- 25 °C)</th> <th>Refrigerada (2 – 8 °C)</th> <th>Congelada (- 20°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Líquido biológico</td> <td>Sin información</td> <td>1 día</td> <td>No aplica</td> </tr> </tbody> </table>			Muestra	T° ambiente (20- 25 °C)	Refrigerada (2 – 8 °C)	Congelada (- 20°C)	Líquido biológico	Sin información	1 día	No aplica
Muestra	T° ambiente (20- 25 °C)	Refrigerada (2 – 8 °C)	Congelada (- 20°C)								
Líquido biológico	Sin información	1 día	No aplica								
Método utilizado	Turbidimétrico / ROCHE / Cobas C311										
Intervalo de referencia	No disponible										
Valor crítico	No disponible										
Información clínica	La utilidad clínica de este examen depende del tipo de fluido biológico y de la condición clínica del paciente, por lo que debe ser interpretado por el médico tratante.										
Parámetros de desempeño	Coeficiente de variación biológico intra individuo: 2.75% Coeficiente de variación biológico inter individuo: 4.7% Limite de detección: 0.2 gr/dL Rango de medición: 0.2 – 12.0 gr/dL										
Referencias	Cobas. TP, Proteína total. Inserto del Fabricante Westgard J. Biologic Variation Database. Disponible en: http://www.westgard.com/biodatabase1.htm										