

Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado

Código 0301085

Nombre del examen TTPA - TTPK

Laboratorios de procesamiento

Laboratorio	Días de procesamiento	Plazo de entrega de resultados
Clínica Puerto Varas	Lunes a Viernes (08:00 - 17:00 horas) Sábado (09:00 - 12:00 horas)	1 día hábil

Preparación del paciente Ayuno de 4 horas

Muestra requerida ● 1 tubo de sangre con citrato de sodio al 3.2 % (tapa celeste, 2.7 mL)
Se debe conservar la relación sangre-anticoagulante, evitar extracción traumática, coagulación y hemólisis de la muestra.

Muestra opcional No aplica

Estabilidad de la muestra

Muestra	T° ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerado (2-8°C)	Congelado (-20°C)
Sangre total	8 horas	No aplica	No aplica
Citrato de sodio			
Plasma citrato	No aplica	No aplica	1 mes

Método Utilizado Coagulométrico (Turbidimétrico) / ACL

Intervalo de referencia 22.6 - 34.1 segundos

Valor critico No aplica

Información clínica Estudio de coagulación, déficit de factores de vía intrínseca y presencia de inhibidores tipo lúpico. Control de tratamiento con heparina no fraccionada. Presencia de heparina, y anticoagulantes inhibidores directa de Trombina interfieren con esta prueba.

Referencia HemosIL APTT-SP (liquid), Inserto técnico.

Realizado Agosto 2019 por Tecnólogo Médico Jefe Natalia Vera A.